



Sicherer Transport von Probenmaterial

im Klinikum Fürth

Institut für Pathologie
MVZ gGmbH, Abteilung Pathologie

Vorschrift zum Probentransport

Wir als Pathologie müssen sicherstellen, dass bei jeglichem Probentransport zu uns bestimmte Vorschriften eingehalten werden. Diese Vorschriften regeln u.a. die ordnungsgemäße Verpackung zum Versand von Patientenproben und den Schutz patientenbezogener Daten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage und im Intranet.

Eine geeignete Verpackung für den Hausinternen Probentransport besteht immer aus folgenden Bestandteilen:

1. Probengefäß: Dieses ist i.d.R mit Formalin gefüllt und beinhaltet die Probe
2. Transportverpackung: Geschlossene sichtgeschützte Kiste

Anforderung von Versandmaterial

Um Versandmaterialien bei uns anzufordern, verwenden Sie bitte unseren Bestellschein. Auf diesem sind alle Materialien aufgelistet, welche wir Ihnen für den sicheren Versand zur Verfügung stellen.

Bestellschein Versandmaterial

Institut für Pathologie und MZT gGmbH, Abteilung Pathologie
Tel. (0911) 7500-1380 Fax (0911) 7500-1802
bestellungen.pathologie@klinikum-fuerth.de

Hinweis: Bestellungen sind nur in vollständiger Verpackungseinheit (VE) möglich. Weitere Informationen und alle unsere Untersuchungsbefragungen finden Sie als pdf zum selbst Ausdrucken auf unserer Homepage.

Bitte per E-Mail oder Fax senden

Klinisches Praxis-Arzt:
Adresse:
Telefon:
Anfordernde Person:
Datum, Unterschrift:

Versandmaterialien

Bezeichnung	Hersteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
Untersuchungsauftrag zur allgemeinen histologischen zytologischen Begutachtung	Diese Formulare können statt von der Homepage ausgedruckt werden.		
Untersuchungsauftrag zur morphopathologischen histologischen zytologischen Begutachtung			
Antrag auf gynäkologische Zytologie		1 Stk	
Eintragung zur Histopathologie		1 Stk	
Pathologisches V-Probengefäß		41 Exemplare	
Versandbeutel (klein)	HistoVase	10 Stk	
Übersichtliche, weiß		50 Stk	
Übersichtliche, weiß		1 Stk	

Bestell für Proben, geeignet für den postinternen Transport

Bezeichnung	Hersteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
Gefäß gefüllt mit Formalin (4%)	Engelbrecht	100 Stk	
Gefäß gefüllt mit Formalin (4%) mit Sekundärgefäß	Engelbrecht	100 Stk	

Bestell für Kliniken, geeignet für Kurstransporte

Bezeichnung	Hersteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
20 ml	Kubo	100 Stk	
50 ml	Kubo	100 Stk	
100 ml	Kubo	100 Stk	
200 ml	SAV	24 Stk	
500 ml	SAV	24 Stk	
1000 ml	SAV	12 Stk	
Ausdrucker Sekundärverpackung UN3373 nach 7009 Folienzettel B	AKS	100 Stk	
2000 Folienzettel B	AKS	100 Stk	
Gefäß, Einmal, leer	Engelbrecht	1 Stk	
Formalin (Formaldehyd 4%)	SAV	1 Stk	
Übersichtliche	SAV	1 Stk	

Gynäkologiestudien

Bezeichnung	Hersteller	Inhalt pro VE	Bestellung Anzahl der VE
Gefäß (klein)	Engelbrecht	100 Stk	
Spezial-Gefäß (klein)	Kubo	24 Stk	
Spezial-Gefäß (klein)	Kubo	24 Stk	
Formaldehyd (4%)	SAV	24 Stk	
Übersichtliche	SAV	24 Stk	

PA-GM F-Bestellschein Versand-VE1.docx Seite 1 von 1

Sie können ihn im **Intranet** finden unter Pathologie→ Formulare

oder auf unserer **Homepage** herunterladen

(<https://www.klinikumfuerth.de/de/medizin/pathologie/einsendung-gewebeproben.php>)

oder per Email bestellen

(bestellungen.pathologie@klinikum-fuerth.de).

Außerdem legen wir jeder Bestellung einen neuen Schein bei.

Sie können Ihre Bestellung am nächsten Werktag ab 14 Uhr bei uns in der Pathologie abholen.

Auswahl der Probengefäße

Wir stellen Ihnen folgende Probengefäßen zur Verfügung:

Gefüllt (ca. halb voll) mit Formalin:



Leere Gefäße (wird erst von Ihnen mit Formalin befüllt), auch für Schnellschnitte geeignet:



Bitte wählen Sie das geeignete Gefäß für das Probenmaterial!

Das Volumenverhältnis Gewebe zu Formalin sollte mindestens **1:3** betragen, damit eine aussagekräftige Befundung gewährleistet werden kann.

Für Zytologien reichen 10ml-Röhrchen oder Urinbecher. **KEINE** Drainagebeutel!

Objektträger: Objektträgerschachteln

Bitte nicht die Schachtel, sondern den OT mit Bleistift beschriften!



Amputate werden von Ihnen in Saugmaterial (Tücher, etc.) eingewickelt und doppelt in verschließbare Plastiktüten verpackt. Das Patientenetikett wird an der äußersten Verpackung angebracht, nicht auf der Transportverpackung.

Patientenetiketten

- **Immer** auf das Probengefäß kleben!
- **Leserlich** und mit **wasserfestem** Stift beschriften!
- **NICHT** auf den **Deckel** kleben.

Antragscheine

Antragscheine werden über Orbis angelegt und müssen ausgedruckt zusammen mit der Probe eingesandt werden.

Weitere Antragsscheine stellen wir Ihnen im Intranet oder zum Download auf unserer Internetseite bereit (<https://www.klinikum-fuerth.de/de/medizin/pathologie/einsendung-gewebeproben.php>). Alternativ können Sie diese auch auf Anfrage bei uns bestellen. Verwenden Sie hierfür bitte den Bestellschein (siehe oben).

[illegible][illegible][illegible]

Transportverpackung



Für den Transport von Proben und Antragscheinen in die Pathologie benutzen Sie bitte unsere zur Verfügung gestellten kleinen blauen Transportboxen.

Diese erhalten Sie von uns auf Anfrage für ihre Station.

Bitte keine Proben in Körben oder Nierenschalen in die Pathologie bringen.

Dies ist wichtig, um den Datenschutz wahren zu können, Auslaufsicherheit von Gefäßen zu garantieren und pietätvoll mit Proben von Patient:innen umzugehen.

Versand per Rohrpost:

Alle Proben: **1070**

Für Schnellschnitte: 1071 (mit Alarmton)